

Probenbereitstellung Pathologie Länggasse

1. Probenvorbereitung / Fixierung

Histopathologie

Biopsien, kleine Exzisate und Curettagematerial

Formalin (4% neutral gepuffertes Formaldehyd) in vorgefüllten Gefässen (von der Pathologie Länggasse zur Verfügung gestellt).

Hodenbiopsien zur Fertilitätsabklärung: In Bouin'scher Fixierlösung fixieren.

Grosse Exzisate

Wählen Sie das ideale Gefäss und füllen Sie dieses mit Formalin (4% neutral gepuffertes Formaldehyd). Dabei folgende Faustregel beachten: *Verhältnis Formalin zu Gewebe = 4:1*

Bei entsprechender Fragestellung ist eine Fadenmarkierung sinnvoll.

Schnellschnitte

Schnellschnitte immer **telefonisch voranmelden** und sofort per Kurier anliefern!

Probe **unfixiert** in leeres Gefäss geben. Kleine Präparate in 0.9% NaCl- getränkter Gaze einschlagen.

Proben für Immunfluoreszenz

Nicht fixieren. Nativ in 0.9% NaCl- getränkter Gaze einschlagen und sofort in einem geschlossenen Gefäss einsenden.

Zytopathologie: siehe separates Dokument Probenvorbereitung Zytopathologie.

2. Verpackung

Die Pathologie Länggasse stellt Ihnen das Entnahme- und Versandmaterial zur Verfügung (s. Bestellformular).

3. Kontrolle

Kontrollieren Sie das Untersuchungsmaterial vor dem Versand

- Ist das Auftragsformular vollständig ausgefüllt? (Patientendaten, Einsenderdaten, klinische Angaben, Art des Materials)
- Sind alle Probengefässe mit dem Patientennamen beschriftet? Sind bei mehreren Probengefässen diese klar deklariert (z.B. nummeriert)?
- Sind die Proben korrekt fixiert und die Gefässe/Behälter gut verschlossen? (*Wichtig, um ein Auslaufen von Inhalt oder Fixierlösung zu vermeiden!*)

4. Bereitstellung für den Transport

Für kleine Gefässe bzw. Ausstrichpräparate verwenden Sie die Versandtüten für Histopathologie / allgemeine Zytopathologie (gelb) bzw. gynäkologische Zytopathologie (weiss).

Für den Transport von grossen Mengen an Untersuchungsmaterial bieten wir Ihnen Transportkisten an.

Kontrollieren Sie: Beinhaltet die Sendung sowohl Probengefäss als auch Auftragsformular!

Versand mittels:

- Post (in den vorfrankierten Versandtüten der Pathologie Länggasse)
- Kurierdienst (Versandtüten oder Transportboxen)

Bei Fragen kontaktieren Sie die Probenannahme der Pathologie Länggasse (Tel. 031 300 24 26)

Wir danken Ihnen für den Auftrag!

Pathologie Länggasse AG

T 031 300 24 24 | F 031 300 24 20

info@patholaenggasse.ch

patholaenggasse.ch

Domizil, Versand Pakete:

Worblentalstrasse 32 West

3063 Ittigen

Korrespondenz, Briefpost:

Postfach

3001 Bern